

Guía de aplicación de Obsidian® ASG


SELLADO | CICATRIZACIÓN | REGENERACIÓN

La secuencia correcta de aplicación de Obsidian® ASG se muestra en los pasos siguientes.




Paso 1

Resección del colon con grapadora o mediante otro procedimiento quirúrgico estandarizado.

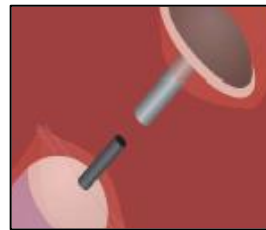


Paso 2

Tras la colocación satisfactoria del yunque y la inserción de la grapadora circular, conecte las dos partes.

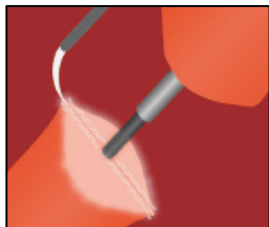

Paso 3

Compruebe la posición del colon proximal y aplique al menos 2 ml de Obsidian® ASG en toda la superficie del muñón del colon distal. **Importante:** Especialmente los bordes exteriores deben cubrirse por completo.

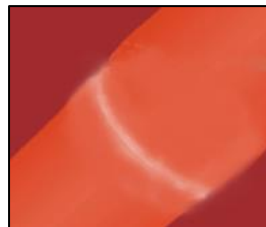


Paso 4

La grapadora se cierra y se dispara según las instrucciones del fabricante, tras lo que se retrae transanalmente con cuidado.



Paso 5

La hermeticidad al aire de la anastomosis se controla mediante la «prueba de burbujas - agua y aire» o con una prueba de contraste.

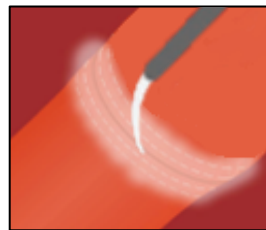


Paso 6

Tras la evacuación del NaCl y la visualización adecuada de la zona anastomótica, refuerce circunferencialmente por completo la anastomosis aplicando Obsidian® ASG 1,5 cm distal y 1,5 cm proximal.



Paso 7

Tras el cierre fascial de la línea media abdominal durante procedimientos laparoscópicos o de toda la incisión quirúrgica en procedimientos abiertos, aplique el resto de Obsidian® ASG directamente en la parte superior del cierre fascial.

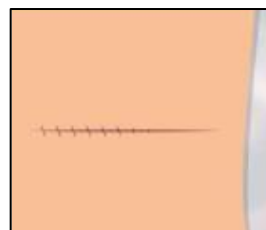

Paso 8

Cierre final de la herida.

Nota: Tras finalizar la aplicación de Obsidian® ASG, espere unos 30 segundos antes de seguir realizando maniobras quirúrgicas hasta que acabe el proceso de polimerización de Obsidian® ASG.