



APL 400 Serie

# Obsidian® ASG anvendelsessæt


## Referencekort




Lokale sprogversioner kan downloades fra [www.vivostat.com/qrcs](http://www.vivostat.com/qrcs)

### DEL 1 – FORBERED ENGANGSAPPLIKATORENHEDEN OG APPLIKATOREN


Tænd for applikatoren på bagsiden, og tilslut fodkontakten

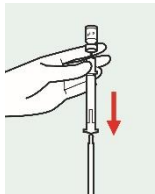


**1.** Placer 21G nålen lige inden i pH 10 hætteglasset, træk væske ind i 1 ml sprøjten

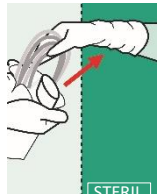


**2.** Overfør engangsapplikatoren + pH-papiret til det sterile område

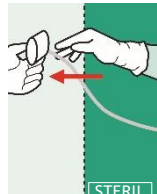

**3.** Fjern sprøjteholderen fra det sterile område

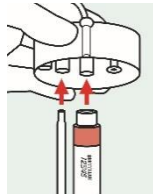


**4.** Indsæt pH 10 og Obsidian sprøjterne i sprøjteholderen

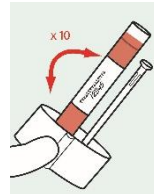


**5.** Drej sprøjteholderen frem og tilbage (x10)



**6.** Når det angives på displayet, åbnes dækslet

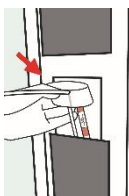

**7.** Indsæt og placer sprøjteholderen

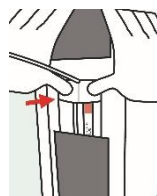

**8.** Tryk sprøjteholderen ind i åbningen med to fingre




**9.** Luk dækslet

#### FORSIGTIG:

- 1) For at undgå luftbobler, der kan påvirke blandingen negativt, må nålen IKKE skubbes helt ind i pH 10 hætteglasset i Trin 1
- 2) Følg Trin 5 omhyggeligt, så trombocytterne ikke lægger sig på bunden, da de er vigtige for helingsprocessen
- 3) Hvis der går mere end 30 min. efter trin 5, drejes sprøjteholderen igen: Tryk på knappen øverst på applikatorenheden i mere end 4 sek., tag sprøjteholderen ud, drej den, skub sprøjteholderen ind i åbningen, luk dækslet, og tryk på knappen i mere end 4 sek.

### DEL 2 (VALGFRI) – ANBRING KATETERET I DET STERILISEREDE ENDOSKOPISE APPLIKATORHÅNDTAG

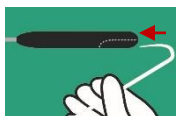


**1.** Placer den endoskopikate- terets spids i enden af håndtaget



**2.** Indsæt og skub endoskopika- teteret helt igennem



**3.** Juster det endoskopikateret til den korrekte position. Kan indstilles i alle vinkler

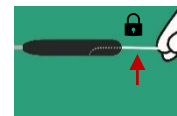


**4.** For at låse positionen skubbes kateteret op, til det "klikker"


### DEL 3 – ISÆT SPRØJTERNE, FYLD, OG START APPLIKATIONEN




**1.** Tryk på knappen for at begynde isætning af sprøjterne

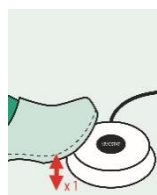

**2.** Tryk en gang på fodkontakten for at fylde

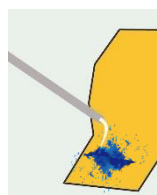


**3.** Peg mod det nederste hjørne af pH-papiret, og foretag automatisk fyldning

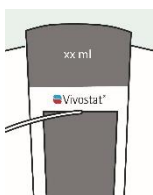

**4.** Den automatiske fyldning standser af sig selv, og ml + sprayfunktion vises



**5.** Kontrollér den korrekte blanding på pH-papiret (fra flydende til viskøst på 10-30 sek.)

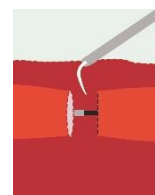

**6.** Når den er klar til anvendelse, følges den separate anvendelsesan- visning for Obsidian® ASG

For vejledning i anvendelse følges den separate anvendelsesanvisning for Obsidian® ASG i boksen.