



APL 400-serie

Obsidian® ASG Applicatiekit


Snelle referentiekaart




Lokale taalversies kunnen worden gedownload op www.vivostat.com/qrcs

DEEL 1 – DE WEGWERPAPPLICATOR EN DE APPLICATOREENHEID VOORBEREIDEN


Zet de applicatoreenheid AAN op de achterkant en sluit de voetschakelaar aan

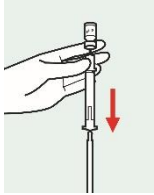


1. Plaats de 21 g naald net in het pH 10-flesje, trek vloeistof op in de 1 ml-injectiespuit

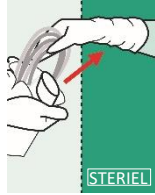


2. Breng de wegwerpapplicator + pH-papier over naar het steriele veld

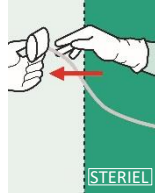

3. Breng de injectiespuit-houder buiten het steriele veld

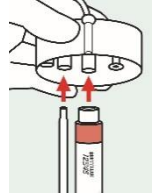


4. Plaats de pH 10 en Obsidian-injectiespuiten in de der heen en injectiespuit-houder

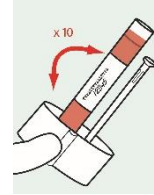


5. Draai de injectiespuit-houder weer (10x)




6. Open de afscherming wanneer dit wordt aangegeven op het display

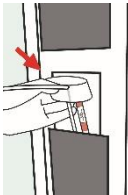

7. Plaats en positioneer de injectiespuit-houder

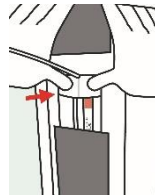

8. Druk de injectiespuit-houder in de holte met twee vingers

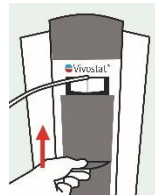


9. Sluit de afscherming


LET OP:

- 1) Om te voorkomen dat luchtballen het mengsel negatief beïnvloeden, dient u de naald NIET helemaal tot het einde in het pH 10-flesje te duwen in stap 1
- 2) Volg stap 5 zorgvuldig zodat er geen bloedplaatjes neerslaan op de bodem, omdat deze essentieel zijn voor het genezingsproces
- 3) Als er meer dan 30 min. verstreken zijn na stap 5, dient u de injectiespuit-houder opnieuw te draaien: Houd de knop aan de bovenkant van de applicatoreenheid langer dan 4 seconden ingedrukt, haal de injectiespuit-houder eruit, draai deze, duw de injectiespuit-houder in de holte, sluit de afscherming en houd de knop langer dan 4 seconden ingedrukt


DEEL 2 (OPTIONEEL) – KATHETER LADEN IN GESTERILISEERDE ENDOSCOPISCHE APPLICATORHANDGREEP

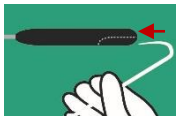


1. Plaats de tip van de endoscopische katheter in het uiteinde van de handgreep

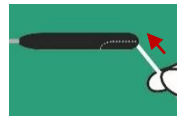

2. Laad de endoscopische katheter en duw hem helemaal door de handgreep

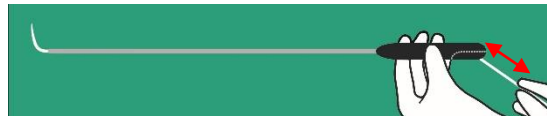

3. Pas de endoscopische katheter aan in de juiste positie - alle hoeken zijn mogelijk

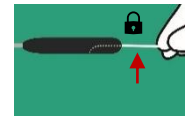


4. Om de positie te vergrendelen duwt u de katheter omhoog tot hij "klikt"


DEEL 3 – INJECTIESPUITEN LADEN, VULLEN EN DE APPLICATIE STARTEN




1. Druk op de knop om te starten met het laden van injectiespuiten

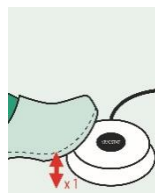

2. Druk eenmaal op de voetschakelaar om de spuiten te vullen

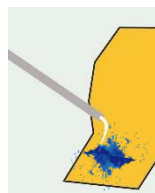


3. Richt de naald naar de onderste hoek van het pH-papier en voer de automatische vulprocedure uit

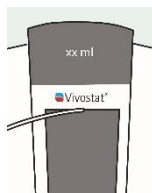

4. De automatische vulprocedure stopt automatisch en ml + spuitmodus wordt weergegeven



5. Controleer het correcte mengsel op pH-papier (van vloeibaar tot viskeus in 10-30 sec.)

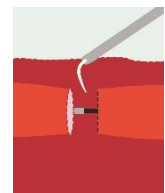

6. Gereed voor applicatie. Volg de aparte Obsidian® ASG Applicatie-instructie

Volg de aparte Obsidian® ASG Applicatie-instructie in de verpakking voor applicatierichtlijnen.